



Środki do dezynfekcji



**POWIERZCHNIE • NARZĘDZIA
STOMATOLOGIA • DŁONIE**





Velox® AF

Preparat na bazie jednego alkoholu
do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego

nie
podrażnia dróg
oddechowych

tylko 35 g
alkoholu

Zastosowanie:

Preparat o niskiej zawartości alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, sprzętu medycznego, łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudnodostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Zalecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz protez i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny świeży zapach. Dzięki dobranej kompozycji składników czynnych produkt posiada szerokie spektrum bójce przy wysokiej tolerancji ze strony użytkowników. Nie powoduje podrażnień skóry i górnych dróg oddechowych.

Czas działania: 1 minuta

Skład: alkohol etylowy, czwartorzędowe związki amonowe

Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	DGHM (EN 13727), EN 13697		1 min.
Grzyby (C. albicans)	DGHM (EN 13624), EN 13697		1 min.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	1 min.	
Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV, wirus grypy A, B, C, Vaccinia, Herpes)	BGA(RKI), DVV	1 min.	
Wirus Rota	EN 14476	1 min.	
Wirus Noro	EN 14476	1 min.	
Wirus Adeno	EN 14476	1 min.	



CE 0197

Velox® Spray Velox® Chusteczki

Preparat / chusteczki na bazie alkoholu
do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego

szerokie
spektrum

czas działania
30 sekund

Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni, sprzętu medycznego, foteli stomatologicznych, łóżek zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Zalecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz protez i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny cytrynowy zapach. Chusteczki nasączone preparatem Velox® Spray. Produkty uzyskały pozytywne opinie: Centrum Zdrowia Dziecka oraz firmy Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe.

Czas działania: 30 sekund

Skład: propan-1-ol, alkohol etylowy

Opakowanie Velox® Spray: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

Opakowanie Velox® chusteczki: 100 szt., 100 szt., rozm. 13 x 20 cm, 23 g/m²

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie / brak	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	DGHM (EN 13727), EN 1040, EN 1276	30 sek.	1 min.
Grzyby (C. albicans)	DGHM (EN 13624), EN 1275, EN 1650	30 sek.	1 min.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	1 min.
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, wirus grypy A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex), HSV	BGA(RKI), DVV	30 sek.	
Wirus Adeno	EN 14476	30 sek.	
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	
Wirus Noro	EN 14476	1 min.	



CE 0197

Velox® NA

Chusteczki bezalkoholowe do szybkiej
dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego

do
inkubatorów
i głowic USG

posiadają
przyjemny
zapach

Zastosowanie:

Chusteczki Velox® NA przeznaczone są do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Zalecane są do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Mogą być stosowane na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Nie zawierają aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Posiadają przyjemny, cytrynowy zapach. Chusteczki nasączone preparatem Velox® Foam NA, który uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Produkt uzyskał pozytywne opinie: Centrum Zdrowia Dziecka oraz firmy Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe.

Czas działania: 1 minuta

Skład: czwartorzędowe związki amonowe

Opakowanie: 100 szt., 100 szt., rozm. 13 x 20 cm, 23 g/m²

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie / brak	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1040, EN 1276, EN 13697	30 sek.	1 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 1275, EN 1650, EN 13697	30 sek.	1 min.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	DGHM (EN 14348)	15 min.	
Wirusy osłonkowe (np.: HBV, HIV, HCV, wirus grypy A, B, C, BVDV, Vaccinia)	BGA(RKI), DVV		1 min.
Wirus Rota	BGA(RKI), DVV		1 min.
Wirus Noro	EN 14476	30 min.	



CE 0197



Velox® Foam NA

Bezalkoholowa pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego

Zastosowanie:

Pianka Velox® Foam NA zalecana jest do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego i plexi. Może być stosowana na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Przeznaczony również do mycia i dezynfekcji wycisków stomatologicznych i protez. Nie zawiera aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny, świeży zapach. Preparat nie wymaga spłukiwania. Produkt uzyskał pozytywne opinie: Centrum Zdrowia Dziecka oraz firmy Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

Czas działania: 1 minuta

Skład: czwartorzędowe związki amonowe

Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem Duo

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie / brak	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1040, EN 1276, EN 13697	30 sek.	1 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 1275, EN 1650, EN 13697	30 sek.	1 min.
Prątki grzyźlicy (M. terrae)	DGHM (EN 14348)	15 min.	
Wirusy oślonkowe (np.: HBV, HIV, HCV, wirus grypy A, B, C, BVDV, Vaccinia)	BGA(RKI), DVV		1 min.
Wirus Rota	BGA(RKI), DVV		1 min.
Wirus Noro	EN 14476	30 min.	

działa na Tbc

czas działania od 30 sek.



CE 0197

Quatroles® Forte Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego

Zastosowanie:

Quatroles® Forte przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego i dużych powierzchni zmywalnych. Ze względu na wysoką tolerancję materiałową idealnie nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji przez zanurzenie oraz do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być również stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawiera aldehydów i fenoli, dzięki czemu nie wywołuje reakcji alergicznych i nie odbarwia powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada przyjemny, kwiatowy zapach.

Stężenie i czas działania: od 0,5% w 15 min

Skład: czwartorzędowe związki amonowe, aminy, alkohol

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

Dozowanie: dla 0,5% → 5 ml na 995 ml wody

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%*	
	EN 14561	1%	0,5%
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Prątki grzyźlicy (M. avium)	EN 14348	0,5%*	
Prątki grzyźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	1%*	
Prątki grzyźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348, EN 14563	4%	1%
Wirus Adeno	EN 14476	1%	
Wirus Polio	EN 14476	4%	
Wirusy oślonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)	EN 14476	0,5%	

* warunki czyste

stężenie już od 0,5% w 15 min.

działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio



CE 0197

Wkrótce w sprzedaży

Quatroles® Strong Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu

Zastosowanie:

Quatroles® Strong to wysoce wydajny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni wszelkiego rodzaju sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka zabiegowe oraz podłogi i ściany. Nowoczesna formuła łącząca QAV, aminy i alkohole gwarantuje doskonałe efekty czyszczące przy wyjątkowo szerokim spektrum bójcym. Nie zawiera aldehydów i fenoli, dzięki czemu może być stosowany w obecności pacjentów. Zalecany do powierzchni ze szkła akrylowego ze względu na dobrą tolerancję materiałową. Roztwór preparatu posiada przyjemny zapach. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Aktywność nieskażonego oraz używanego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Produkt uzyskał pozytywne opinie: Centrum Zdrowia Dziecka oraz firmy Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

Stężenie i czas działania: od 0,25% w 15 min

Skład: czwartorzędowe związki amonowe, aminy, alkohol

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

Dozowanie: dla 0,25% → 2,5 ml na 997,5 ml wody

Spektrum	Normy wg EN 14885	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1040, EN 1276	0,25%			
	EN 13697	0,5%	0,25%		
	EN 13727	0,5%	0,25%	0,25%	0,25%
	EN 14561	1%	0,5%	0,25%	0,25%
Bakterie (Salmonella, Acineobacter)	EN 1276	0,25%			
Bakterie (Legionella, Klebsiella)	EN 13727		0,25%	0,25%	0,25%
Grzyby (A. niger, C. albicans)	EN 1275, EN 1650		0,25%		
	EN 13697	0,5%	0,25%		
	EN 13624	0,5%*	0,25%	0,25%	0,25%
	EN 14562	1%	0,5%	0,25%	0,25%
Prątki grzyźlicy (M. terrae, M. avium)	EN 14348	1,5%	0,5%	0,25%	0,25%
Wirus BVDV, HCV	EN 14476+A1	0,25%			
Wirus Vaccinia, HBV, HIV	EN 14476+A1		0,25%		
Wirus Adeno	EN 14476+A1	1,5%	0,5%	0,25%	0,25%
Wirus Polio	EN 14476+A1		0,5%*	0,25%	0,25%
Spory	EN 14347			0,5%	

* warunki czyste

stężenie od 0,25% w 15 min.

działa na Adeno, Polio, Spory



CE 0197



Quatroles® Protect Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu

Zastosowanie:

Quatroles® Protect to preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych ze szkła, porcelany, metalu, gumy, drewna oraz aluminium. Zalecany jest do dezynfekcji sprzętu medycznego, aparatury oddechowej oraz wyrobów ze szkła akrylowego. Przeznaczony również do mycia i dezynfekcji wycisków stomatologicznych. Ze względu na szerokie spektrum bójcze ma zastosowanie w obszarach podwyższonego ryzyka takich jak szpitale i gabinety. Na powierzchni tworzy niewidoczny film ochronny opóźniający ponowne zanieczyszczenie. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiada przyjemny, kwiatowy zapach. Nie wymaga spłukiwania. Aktywność nieużywanego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Produkt uzyskał pozytywne opinie: Centrum Zdrowia Dziecka oraz firmy Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.

Stężenie i czas działania: od 0,25% w 5 min.
Skład: czwartorzędowe związki amonowe, aminy

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L
Dozowanie: dla 0,25% → 2,5 ml na 997,5 ml wody

Spektrum	Normy wg EN 14885	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1040, EN 1276	0,25%			
	EN 13697	0,5%			0,1%
Grzyby (C. albicans)	EN 1275	0,25%			
	EN 1650, EN 13697	0,5%			0,1%
Prątki grzylicy (M. terrae)*	DGHM (EN 14348)		2%	0,5%	0,25%
Wirusy osłonkowe (w tym HBV, HIV, HCV, Vaccina, BVDV)	EN 14476		0,25%		
Wirus Adeno	EN 14476	0,5%			0,25%
Wirus Rota	EN 14476	0,5%			

* warunki czyste

zalecany
do wycisków
stomatologicznych

stężenie
od 0,25%
w 5 min.



CE 0197

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

Viruton® Powder Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi

Zastosowanie:

Wydajny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, rotacyjnych oraz wszelkiego rodzaju endoskopów. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej, w obiegu zamkniętym, a także w myjkach ultradźwiękowych. Posiada bardzo dobre właściwości myjące i rozpuszczające zaschnięte pozostałości organiczne jak krew, białko i wydzieliny. Nowoczesna formuła gwarantuje pełne spektrum działania w niskim stężeniu użytkowym 1% i krótkim czasie działania. Preparat wykazuje wysoką tolerancję materiałową i ochronę przed korozją. Idealny do endoskopów, wyrobów z tworzyw sztucznych. Posiada pozytywną opinię producenta endoskopów Storz. Może być stosowany również do mycia i dezynfekcji powierzchni. Produkt nie wymaga dodania aktywatora.

Stężenie i czas działania: od 1% w 60 min.

Skład: nadwęglan sodu, TAED, inhibitory korozji

Opakowanie: 1 kg z miarką, 6 kg z miarką. Stosowanie miarki zgodnie z tabelą dozowania.

Dostępne
paski testowe

Spektrum	Normy wg EN 14885	5 min.	10 min.	60 min.	120 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727, EN 14561	1%			
Grzyby (C. albicans)	EN 13624, EN14562	1%			
	EN 14562				1%
Grzyby (A. niger)	EN 1650		2%		
Prątki grzylicy (M. terrae)	EN 14348, EN 14563	1%			
Prątki grzylicy (M. avium)	EN 14348, EN 14563		1%		
Wirus Adeno	EN 14476	1%			
Wirus Polio	EN 14476		2%	1%	
Wirusy osłonkowe (w tym HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)	EN 14476		2%	1%	
Spory (B. subtilis)	EN 13704	2%			
Spory (C. sporogenes, B. cereus)	EN 13704		2%	1%	
Spory (C. difficile)	EN 13704			1%	

Badania dla warunków brudnych

nie wymaga
aktywatora

stężenie 1%



CE 0197

Tabela dozowania Viruton Powder					
ilość wody	stężenie	dozowanie			
1 L	1 %	10 g = 1x	1x	1x	1x
2 L	1 %	20 g = 3x	1x	1x	1x
5 L	1 %	50 g = 7x	1x	1x	1x
8 L	1 %	80 g = 12x	1x	1x	1x

10 g proszku = 15 ml

10 ml = 10 ml 5 ml = 5 ml

Viruton® Forte Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Zastosowanie:

Viruton® Forte posiada bardzo dobre właściwości czyszczące i szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie działania. Przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego.

Czas działania: 15 min.

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

Skład: propyloamina, czwartorzędowe związki amonowe, inhibitory korozji

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%*	
	EN 14561	1%	0,5%
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Prątki grzylicy (M. avium)	EN 14348	0,5%*	
Prątki grzylicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	1%*	
Prątki grzylicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348, EN 14563	4%	1%
Wirus Adeno	EN 14476	1%	
Wirus Polio	EN 14476	4%	
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)	EN 14476	0,5%	

* warunki czyste

działa na
B, F, V, Tbc,
Adeno, Polio

stężenie
już od 0,5%



CE 0197

Wkrótce w sprzedaży



Viruton® Strong Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Zastosowanie:

Viruton® Strong to wysoce skuteczny preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju termolabilnych i termostabilnych instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych (za wyjątkiem endoskopów giętkich). Nowoczesna formuła gwarantuje doskonałe efekty czyszczące nawet przy wysokim obciążeniu białkowym w krótkim czasie działania. Viruton® Strong posiada szerokie spektrum bójcze w bardzo niskich stężeniach użytkowych. Zastosowanie inhibitorów korozji gwarantuje wysoką tolerancję materiałową instrumentarium oraz wyrobów medycznych i przyrządów laboratoryjnych ze szkła, porcelany, metalu, gumy i tworzyw sztucznych. Roztwór preparatu posiada przyjemny zapach. Aktywność nieużywanego oraz używanego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Może być stosowany w myjce ultradźwiękowej.

Stężenie i czas działania: od 0,5% w 15 min.

Skład: czwartorzędowe związki amonowe, aminy, alkohole, inhibitory korozji

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

Dozowanie: dla 0,5% → 5 ml na 995 ml wody

Spektrum	Normy wg EN 14885	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Bakterie (w tym MRSA, Legionella, Klebsiella)	EN 1040	0,25%			
	EN 13727	0,5%	0,25%	0,25%	0,25%
	EN 14561	1%	0,5%	0,25%	0,25%
Grzyby (A. niger, C. albicans)	EN 1275		0,25%		
	EN 13624	0,5%	0,25%	0,25%	0,25%
	EN 14562	1%	0,5%	0,25%	0,25%
Prątki gruźlicy (M.terrae, M. avium)	EN 14348	1,5%	0,5%	0,25%	0,25%
	EN 14563	2%	1%	0,5%	0,25%
Wirus Vaccinia, HBV, HIV	EN 14476+A1		0,25%		
Wirus BVDV, HCV	EN 14476	0,25%			
Wirus Adeno	EN 14476+A1	1,5%	0,5%	0,25%	0,25%
Wirus Polio	EN 14476+A1		1%	0,25%	0,25%
Spory	EN 14347			0,5%	

pełne spektrum
(w tym Adeno,
Polio, Spory)

stężenie 0,5%
w 15 min.



CE 0197

Viruton® Plus

Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi

Zastosowanie:

Viruton® Plus to wydajny koncentrat o wyjątkowych właściwościach czyszczących i wysokiej tolerancji materiałowej. Przeznaczony jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej, w automatach myjących, a także w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany jest do instrumentów chirurgicznych, stomatologicznych oraz wszelkiego rodzaju endoskopów. Aktywność nieużywanego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Posiada pozytywną opinię producentów endoskopów Storz.

Stężenie i czas działania: od 0,25% w 60 min.

Skład: czwartorzędowe związki amonowe, inhibitory korozji

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

Dozowanie: dla 0,25% → 2,5 ml na 997,5 ml wody

Spektrum	Normy wg EN 14885	5 min.	15 min.	30 min.	60 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727, EN 14561	1%	0,5%		0,25%
Grzyby (C. albicans)	EN 13624, EN 14562	1%	0,5%		0,25%
Prątki gruźlicy (M.terrae)	EN 14348, EN 14563		2%	0,5%	0,25%
Wirusy osłonkowe (w tym HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)	EN 14476	1%	0,25%		
Wirusy nieosłonkowe* (Adeno)	EN 14476	0,5%			0,25%

* warunki czyste

zawiera inhibitory
korozji

stężenie
od 0,25%
w 60 min.



CE 0197

Viruton® Foam

Pianka do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych i obrotowych

Zastosowanie:

Viruton® Foam to gotowy do użycia preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji. Zawiera inhibitory korozji oraz wykazuje wysoką tolerancję materiałową, dzięki czemu idealnie sprawdza się do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metalu, a także materiałów z tworzyw sztucznych i gumy. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Zapobiega zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji. Posiada przyjemny zapach. Wykazuje działania bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi może wynieść max. 48 godz.

Czas działania: 15 min.

Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem Duo, kanister 5L

Skład: propyloamina, czwartorzędowe związki amonowe, inhibitory korozji

Spektrum	Normy wg EN 14885	Wysokie obciążenie org.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727, EN 14561	15 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624, EN 14562	15 min.
Prątki gruźlicy (M.terrae)	DGHM (EN 14348)	30 min.
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)	BGA(RKI), DVV	15 min.

pianka
do wstępnej
dezynfekcji
narzędzi

szerokie
spektrum
w 15 min.

idealna do
pojemników
i kontenerów




CE 0197

Jak przygotować roztwór roboczy?

W celu uzyskania oczekiwanego stężenia należy odmierzyć odpowiednią ilość wody, następnie wlać podaną w tabelce ilość preparatu dezynfekcyjnego.

Stężenie %	2%	1%	0,5%	0,25%
Ilość koncentratu w ml	20	10	5	2,5
Ilość wody w ml	980	990	995	997,5

Jak korzystać z dozownika?

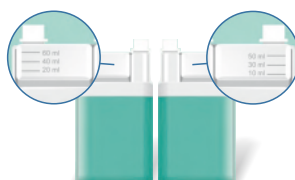

należy odkręcić
nakrętkę
nad dozownikiem



ucisnąć butelkę,
płyn przepływa
ruką do odpowiedniego
poziomu dozownika

Viruton® Bohr

Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych

Zastosowanie:

Viruton® Bohr zalecany jest do dezynfekcji: wiertel, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawiera inhibitory korozji, dzięki czemu idealnie chroni instrumenty ze stali i stopów metali. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej.

Czas działania: 15 min.

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

Skład: czwartorzędowe związki amonowe, inhibitory korozji

Spektrum	Normy wg EN 14885	Wysokie obciążenie org.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727, EN 14561	15 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624, EN 14562	15 min.
Prątki gruźlicy (M.terrae, M. avium)	EN 14348, EN 14563	15 min.
Wirus Adeno	EN 14476	15 min.
Wirus Polio	EN 14476	15 min.
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)	EN 14476	15 min.



gotowy do użycia

działa w 15 min na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio



CE 0197

Wkrótce w sprzedaży

Quatrodes® Drill

Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych

Zastosowanie:

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz instrumentów chirurgicznych. Zalecany jest do dezynfekcji: narzędzi oraz wiertel, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawiera inhibitory korozji, dzięki czemu idealnie sprawdza się do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali. Posiada bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Posiada przyjemny zapach. Może być stosowany poprzez zanurzenie narzędzi w myjce ultradźwiękowej.

Czas działania: 15 min.

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5 L

Skład: propyloamina, czwartorzędowe związki amonowe, inhibitory korozji

Spektrum	Normy wg EN 14885	Wysokie obciążenie org.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727, EN 14561	15 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624, EN 14562	15 min.
Prątki gruźlicy (M.terrae)	DGHM (EN 14563)	30 min.
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)	BGA(RKI), DVV	15 min.

posiada przyjemny, kwiatowy zapach

czas działania 15 min.



CE 0197

Quatrodes® Unit

Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących

Zastosowanie:

Quatrodes® Unit przeznaczony jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Preparat nie pieni się. Przy codziennym stosowaniu zapobiega powstawaniu biofilmu. Może być stosowany również do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem.

Czas działania: 5 min.

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

Skład: czwartorzędowe związki amonowe

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%*	
	EN 14561	1%	0,5%
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Prątki gruźlicy (M. avium)	EN 14348	0,5%*	
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	1%*	
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348, EN 14563	4%	1%
Wirus Adeno	EN 14476	1%	
Wirus Polio	EN 14476	4%	
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV)	EN 14476	0,5%	

* warunki czyste

działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio

stężenie już od 0,5%



CE 0197

Wkrótce w sprzedaży

Quatrodes® Suck

Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących

Zastosowanie:

Wyjątkowo skuteczny preparat o właściwościach dezodorujących przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji urządzeń ssących, separatorów amalgamatu i splotaczek unitu dentystycznego. Może być stosowany również do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem. Preparat nie pieni się. Przy codziennym stosowaniu zapobiega powstawaniu biofilmu.

Czas działania: 5 min.

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem

Skład: czwartorzędowe związki amonowe

Spektrum	Normy wg EN 14885	2 min.	5 min.	60 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276		2%	
Grzyby (C. albicans)	EN 1650		2%	
Prątki gruźlicy (M. terrae)	DGHM (EN 14348)			3%
Wirusy otoczkowe (w tym HBV, HIV, HCV)	BGA(RKI)/DVV	2%		

czas działania 5 min.

nie pieni się



CE 0197



Produkty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Velodes®

Fllyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

czas działania
30 sekund

zawiera
lanolinę

Zastosowanie:

Velodes® to gotowy do użycia alkoholowy preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych (w tym HIV, HBV, HCV) oraz wirusa Rota i Noro. Preparat jest łagodny dla skóry, posiada przyjazne dla skóry pH. Zawiera lanolinę - zmiękczaającą substancję ochronną, która zabezpiecza głębsze warstwy naskórka.

Sposób użycia: Higieniczna dezynfekcja rąk (wg normy EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg normy EN 12791): 3 ml preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 60 sekund. Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Nie stosować bezpośrednio na słuzówkę i otwarte rany.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr: 5358/13

Czas działania: 30 sekund

Skład: etanol, 2-propanol, bifenyl-2-ol

Opakowanie: butelka 250 ml ze spryskiwaczem, butelka 500 ml, butelka 1 L, kanister 5 L

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne
Bakterie (w tym MRSA)	EN 12054	30 sek.
Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 1275, EN 1650	30 sek.
Wirusy otoczkowe (w tym Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV)	EN 14476	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.
Wirus Noro	EN 14476	30 sek.

Velodes® Gel

Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

czas działania
30 sekund

zawiera
lanolinę

Zastosowanie:

Velodes® Gel to gotowy do użycia alkoholowy preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych (w tym HIV, HBV, HCV) oraz wirusa Rota i Noro. Preparat jest łagodny dla skóry, posiada przyjazne dla skóry pH 6,3. Zawiera lanolinę - zmiękczaającą substancję ochronną, która zabezpiecza głębsze warstwy naskórka.

Sposób użycia: Higieniczna dezynfekcja rąk (wg normy EN 1500): 2 x 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg normy EN 12791): 3 ml preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 60 sekund. Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Nie stosować bezpośrednio na słuzówkę i otwarte rany.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr: 5362/13

Czas działania: 30 sekund

Skład: etanol, 2-propanol, bifenyl-2-ol

Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1 L*, kanister 5 L*

*dostępne na zamówienie

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne
Bakterie (w tym MRSA)	EN 12054	30 sek.
Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 1275, EN 1650	30 sek.
Wirusy otoczkowe (w tym Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV)	EN 14476	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.
Wirus Noro	EN 14476	30 sek.


Pompka do mydła, żelu i płynu do dezynfekcji rąk

Pompka pasuje do butelek Velodes o poj. 500 ml i 1 l
Doza: 2 ml



Dozownik łokciowy uniwersalny 1 L i 0,5 L do mydła, żelu i płynu

- dozownik wykonany z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol,
- może być sterylizowany w autoklawie,
- posiada ruchomą tarczę z możliwością ustawienia dozy od 1 ml do 3 ml (co 0,5 ml),
- pasuje do opakowania 500 ml i 1 l z linii Velodes
- opcja dokupienia podstawki „niekapki”

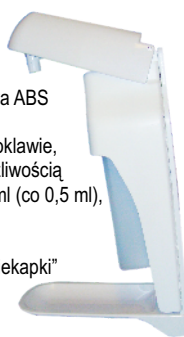

Dozowniki pasują do butelek Velodes o poj. 500 ml i 1 l



Dozowniki łokciowe 1 L oraz 0,5 L do mydła, żelu i płynu

- dozownik wykonany z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol,
- może być sterylizowany w autoklawie,
- posiada ruchomą tarczę z możliwością ustawienia dozy od 0,5 ml do 1,5 ml (co 0,5 ml),
- pasuje odpowiednio do butelek 500 ml i 1 l z linii Velodes



Dozownik wkrótce w sprzedaży



Produkty do mycia i pielęgnacji rąk

Velodes® Scrub

Antybakteryjna emulsja do higienicznego mycia rąk

zalecana
dla
alergików

zawiera
glicerynę
i olejek
kokosowy

Zastosowanie:

Velodes® Scrub to delikatna emulsja do mycia rąk i całego ciała. Nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej. Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce. Neutralne dla skóry pH oraz zawartość gliceryny i pochodnej olejku kokosowego pozwala na codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień. Dzięki zawartości triclosanu posiada właściwości, które nie sprzyjają rozwojowi bakterii. Emulsja może być stosowana w przemyśle spożywczym, instytucjach służby zdrowia oraz w miejscach o zwiększonych wymaganiach sanitarnych.

Sposób użycia:

Niewielką ilość płynu nanieść na wilgotne dłonie, rozetrzeć do wytworzenia piany i spłukać wodą.

Składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa), substancje nawilżające (gliceryna), triclosan

Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1L, kanister 5L



Velodes® Soap

Emulsja do mycia rąk i ciała

dla
personelu
medycznego

myje
i pielęgnuje
dłonie

Zastosowanie:

Velodes® Soap to emulsja do mycia rąk, skóry głowy i całego ciała. Emulsja nie zawiera mydła, dzięki czemu może być stosowana u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Ze względu na zawartość składników pielęgnujących zalecana jest szczególnie dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na macerację skóry. Emulsja polecana także do mycia pacjentów z odleżynami.

Sposób użycia: Mycie rąk: niewielką ilość emulsji nanieść na nawilżone dłonie do czasu powstania delikatnej piany. Następnie spłukać wodą. **Mycie pod prysznicem:** Emulsję nanieść na zwilżoną skórę i włosy. Myć ciało, następnie spłukać pod bieżącą wodą. **Mycie w wannie:** Emulsję wlać do wanny napełnionej wodą. Myć skórę i włosy, następnie spłukać pod bieżącą wodą.

Składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa), substancje nawilżające (gliceryna), kompozycja zapachowa

Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1L, kanister 5L



PIELĘGNACJA RĄK



Velodes® Cream

Krem ochronny do rąk

Zastosowanie:

Velodes® Cream doskonale nawilża skórę, w znacznym stopniu ją uelastycznia i niweluje uczucie szorstkości. Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Szczególnie zalecany dla lekarzy, personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i noszenia rękawic. Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość. Dodatkowo wykazuje działanie osłaniające i łagodzące podrażnienia skóry. Szybko się wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu.

Sposób użycia: Nanieść niewielką ilość kremu na czystą, suchą skórę rąk. Delikatnie wmasować w skórę dłoni i paznokci. Czynność powtarzać po każdym myciu rąk.

pielęgnuje
i odżywia
skórę

zawiera
witaminę E
i glicerynę

zawiera
oliwę
z oliwek

łagodzi
podrażnienia

Składniki: Aqua, Cetostearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate, Cetareth-20, Cyclopentasiloxane, Paraffinum Liquidum, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, DMDM Hydantoin, Carbomer, Parfum, Citric Acid, BHT, Olea Europaea (Olive) Oil, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene, Hexyl Cinnamal

Opakowanie: butelka 500 ml



Profesjonalne systemy
utrzymania higieny

Producent:

Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polska, tel.: 81 535 22 22
info@medi-sept.com.pl, www.medi-sept.pl

więcej informacji o produktach na stronie
www.medi-line.pl

Data opracowania: 2014.09

Dystrybutor: